

IMPAX EE CD Viewer

2. Στοιχεία ασθενούς:
Όνομα, ημερομηνία
γέννησης, φύλο

3. Συνήθη εργαλεία: Επιλογές διάταξης, επαναφορά,
κινηματογραφική προβολή. Για να δείτε μια σύντομη
περιγραφή ενός εργαλείου, τοποθετήστε τον δείκτη σας
επάνω στο εικονίδιο. Θα εμφανιστεί η συμβουλή
εργαλείου.

4. Επισημειώσεις και μετρήσεις:
Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξει
η πλήρης λίστα.


**1. Ανοίξτε το
τμήμα παραθύρου
σειράς:** Λίστα όλων
των ανοικτών
σειρών για μια
εμφανιζόμενη
εξέταση. Σύρετε
τις σειρές στα
παράθυρα για να
τις εμφανίσετε
στην περιοχή
εικόνας.

The screenshot displays the IMPAX EE CD Viewer interface. On the left, a 'Series' panel (1) lists scan series with thumbnails. The main area shows a large axial CT scan of a pelvis. A top toolbar (3) contains icons for windowing, zooming, and navigation. On the right, two smaller axial CT scans are shown, with a measurement tool (4) visible. Technical details for the scans are displayed at the bottom of each image area, including patient ID (X0008), date (Jan 1, 1935), and scan parameters like kV, mAs, and WL.

Πρώτα βήματα με το CD Viewer

Το IMPAX EE CD viewer παρέχεται με διάφορες **προεπιλογές αντίθεσης/φωτεινότητας** από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε τις καλύτερες ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης για συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα λειτουργιών για να επιλέξετε τις προεπιλογές.

Συντόμευση	Προεπιλογή
F1	Οστό
F2	Ήπαρ
F3	Πνεύμονας
F4	Κρανίο
F5	Εγκέφαλος
F6	Μαλακός ιστός

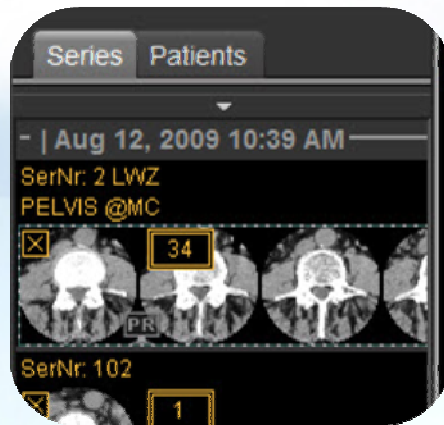

Ανοίξτε το τμήμα παραθύρου σειράς:

Σύρετε τις σειρές στα παράθυρα για να τις εμφανίσετε στην περιοχή εικόνας. Κάντε δεξί κλικ στις μικρογραφίες για περισσότερες επιλογές.


Τα παράθυρα περιέχουν διαδραστικές περιοχές: Τοποθετήστε τον δείκτη σας επάνω στην εικόνα για να δείτε τα εργαλεία στο παράθυρο, σύρετε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.

Εικόνα	Εργαλείο	Περιγραφή
	Ζουμ	Μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνας
	Μετακίνηση	Μετακινήστε την εικόνα στο παράθυρο
	Περιστροφή	Περιστρέψτε ελεύθερα την εικόνα (360°)
	Κάθετη αναστροφή	Κάντε αναστροφή της εικόνας κατά μήκος του άξονα x
	Οριζόντια αναστροφή	Κάντε αναστροφή της εικόνας κατά μήκος του άξονα y
	Κύλιση προς τα πίσω	Προβολή προηγούμενης εικόνας στη σειρά
	Κύλιση προς τα εμπρός	Προβολή επόμενης εικόνας στη σειρά
	Περιστροφή 90° προς τα αριστερά	Αριστερόστροφη περιστροφή κατά 90°
	Περιστροφή 90° προς τα δεξιά	Δεξιόστροφη περιστροφή κατά 90°
ROI	Διαγραφή όλων των περιοχών ενδιαφέροντος (ROI)	Διαγραφή όλων των επισημειώσεων και των μετρήσεων

[x]	Study Date	Modality
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 10:2...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM

Παράθυρο διαλόγου επιλογής εξέτασης:

Αν το CD/DVD περιέχει πολλές εξετάσεις, μπορείτε να επιλέξετε να φορτώσετε μία ή περισσότερες εξετάσεις στο viewer. Τα αρχεία εικόνων που αποθηκεύονται μαζί με την εξέταση μπορεί να είναι πολύ μεγάλα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φορτωθεί μόνο μία εξέταση τη φορά. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε κλικ στο εργαλείο επιλογής εξέτασης στην επάνω αριστερή γωνία της επάνω γραμμής εργαλείων για να μεταβείτε στην εξέταση που έχει φορτωθεί.

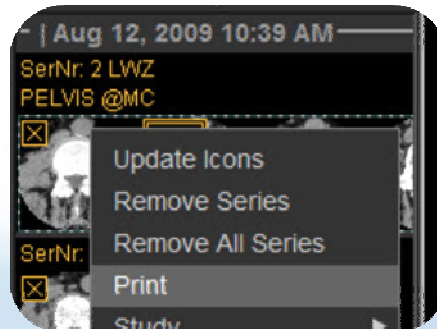


Για να εκτυπώσετε μια σειρά:

- Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε *Εκτύπωση*.
- Ορίστε περαιτέρω ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης

Αλληλεπίδραση με το ποντίκι:

Κάντε κλικ: Επιλογή Εργαλείου

Διπλό κλικ: Οθόνη 1:1
SPACE + μεταφορά: Μετακίνηση

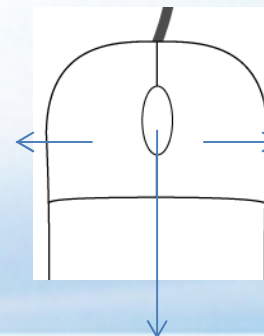

Κάντε κλικ: Μενού περιβάλλοντος

Κύλιση: Κύλιση στις σειρές

Κάντε κλικ: Ενεργοποίηση λειτουργίας ζουμ

SPACE + κύλιση: Μεγέθυνση και σμίκρυνση

Κρατήστε πατημένο και κάντε μεταφορά: Αλλαγή αντίθεσης/φωτεινότητας

CTRL + κρατήστε πατημένο και κάντε μεταφορά: Ακριβής προσαρμογή αντίθεσης/φωτεινότητας